



Revamil® Balm | 15 Gramm Tube

Produktbeschreibung

Revamil® Balm ist eine Mischung aus einer indifferenten Hautschutzsalbe und reinem medizinischem Honig. Aufgrund des hohen Honiggehalts hat die Salbe sowohl gute Wundheilungseigenschaften als auch eine antibakterielle Wirkung. Revamil® Balm ist hautfreundlich und eignet sich in erster Linie zur Behandlung oberflächlicher Wunden, wie beispielsweise Schürfwunden und Kratzverletzungen bei Ekzem. Revamil® Balm kann in der professionellen Wundversorgung und auch zu Hause als Erste Hilfe Salbe eingesetzt werden.

Indikationen

Oberflächliche Wunden	• • •
Tiefe Wunden	•
Infizierte Wunden	• •
Chronische Wunden	• •
Akute Wunden	• •
Hautfreundlich	• • •

Gebrauchsanweisung

- Die Wunde je nach Bedarf wie üblich reinigen
- Die Salbe dünn auf die Wundoberfläche oder die beschädigte Haut auftragen
- Die Salbe einziehen lassen und eventuell mit einer Mullbinde abdecken
- Die Salbe kann mehrmals täglich bis zur vollständigen Heilung aufgetragen werden.

Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - www.fribamed.de

Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - www.bfactory.nl

