



# Revamil® hydrophiles Wundgel

| 18 Gramm Tube

## Produktbeschreibung

Das Revamil® hydrophiles Wundgel besteht zu 100% aus reinem medizinischem Honig mit einem hohen Enzymgehalt und geringem pH-Wert. Dadurch hat Revamil® hydrophiles Wundgel eine starke, lang anhaltende antibakterielle Wirkung. Durch die langfristige Freisetzung von Wasserstoffperoxid in geringen Mengen eignet sich Revamil® hydrophiles Wundgel besonders gut für chronische und infizierte Wunden. Eine Tube Revamil® hydrophiles Wundgel enthält 18 Gramm gamma-sterilisierten Honig.

## Indikationen

Oberflächliche Wunden	•
Tiefe Wunden	••
Infizierte Wunden	•••
Chronische Wunden	••••
Akute Wunden	••
Mehrere Behandlungen mit einer Tube	••••

## Gebrauchsanweisung

- Die Wunde wie üblich reinigen
- Trockene Wunden leicht mit sauberem Wasser anfeuchten
- Das Wundgel dünn auftragen und wie üblich abdecken
- Die Wunde in der ersten Woche einmal täglich behandeln, danach alle zwei bis drei Tage.

## Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich  
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - [www.fribamed.de](http://www.fribamed.de)

## Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)  
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - [www.bfactory.nl](http://www.bfactory.nl)



Revamil®