



# Revamil® Wundverband

## Produktbeschreibung

Eine Verpackung Revamil® Wundverband enthält 7 Verbände mit 100%ig reinem medizinischem Honig mit hohem Enzymgehalt und geringem pH-Wert. Der flexible Polyacetatverband klebt nicht an der Wunde fest und garantiert die langsame Freisetzung des Honigs im Wundbett. Der Revamil® Wundverband eignet sich besonders gut zur Behandlung chronischer Wunden jeder Art. Der Revamil® Wundverband ist erhältlich in Größen von 8 x 8 cm und 10 x 20 cm. Dabei handelt es sich um Einwegverbände; ein Verband ist ausreichend für eine Behandlung.

## Indikationen

Oberflächliche Wunden	•
Tiefe Wunden	•
Infizierte Wunden	• • •
Chronische Wunden	• • •
Akute Wunden	• •
Patientenfreundlich	• • •

## Gebrauchsanweisung

- Die Wunde wie üblich reinigen
- Den Wundverband aus der Verpackung nehmen und die Wunde mit dem imprägnierten Mull abdecken
- Den Verband in der üblichen Weise fixieren
- Die Wunde in der ersten Woche einmal täglich behandeln, danach alle zwei bis drei Tage

## Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich  
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - www.fribamed.de

## Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)  
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - www.bfactory.nl



Revamil®  
wound dressing

Wundverband geïmpregneerd met honing  
Inhoud: 7 gazen - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Wound Dressing impregnated with honey  
Content: 7 dressings - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Mit Honig imprägnierte Wundauflage  
Inhalt: 7 Auflagen - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Compresse imprégnée de miel  
Contenu: 7 compresses - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Garza impregnata di unguento al miele  
Contenuto: 7 Garze - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Bala emdirilniş tul bandaj  
İçerik: 7 sargı - 8 x 8 cm<sup>2</sup>

Revamil®