



# Revamil® Wundverband

## Produktbeschreibung

Eine Verpackung Revamil® Wundverband enthält 7 Verbände mit 100%ig reinem medizinischem Honig mit hohem Enzymgehalt und geringem pH-Wert. Der flexible Polyacetatverband klebt nicht an der Wunde fest und garantiert die langsame Freisetzung des Honigs im Wundbett. Der Revamil Wundverband eignet sich besonders gut zur Behandlung chronischer Wunden jeder Art. Der Revamil Wundverband ist erhältlich in Größen von 8 x 8 cm und 10 x 20 cm. Dabei handelt es sich um Einwegverbände; ein Verband ist ausreichend für eine Behandlung.

## Indikationen

Oberflächliche Wunden	•••
Tiefe Wunden	•
Infizierte Wunden	•••
Chronische Wunden	•••
Akute Wunden	••
Patientenfreundlich	•••

## Gebrauchsanweisung

- Die Wunde wie üblich reinigen
- Den Wundverband aus der Verpackung nehmen und die Wunde mit dem imprägnierten Mull abdecken
- Den Verband in der üblichen Weise fixieren
- Die Wunde in der ersten Woche einmal täglich behandeln, danach alle zwei bis drei Tage

## Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich  
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - www.fribamed.de

## Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)  
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - www.bfactory.nl

