



Revamil® Single Dose

Produktbeschreibung

Eine Verpackung Revamil® Single Dose enthält 12 Spritzen mit 100%ig reinem medizinischem Honig mit einem hohen Enzymgehalt und geringem pH-Wert. Dadurch hat Revamil Single Dose eine starke, lang anhaltende antibakterielle Wirkung. Es handelt sich dabei um Einwegspritzen; eine Spritze ist ausreichend für eine Behandlung. Mithilfe der Spritze kann das Honig Gel gut in tiefe Wunden und unter die Wundränder eingebracht werden.

Indikationen

Oberflächliche Wunden	•
Tiefe Wunden	•••
Infizierte Wunden	•••
Chronische Wunden	•••
Akute Wunden	••
Benutzerfreundlichkeit und Hygiene	•••

Gebrauchsanweisung

- Die Wunde wie üblich reinigen
- Trockene Wunden leicht mit sauberem Wasser anfeuchten
- Das Honig Gel in die Wunde einbringen, indem man die Spritze ausdrückt, bis sie leer ist
- Die Wunde in der üblichen Weise abdecken
- Die Wunde in der ersten Woche einmal täglich behandeln, danach alle zwei bis drei Tage.

Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - www.fribamed.de

Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL) - Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - www.bfactory.nl

