



# Revamil® hydrophiles Wundgel

| 18 Gramm Tube

## Produktbeschreibung

Das Revamil® hydrophiles Wundgel besteht zu 100% aus reinem medizinischem Honig mit einem hohen Enzymgehalt und geringem pH-Wert. Dadurch hat Revamil hydrophiles Wundgel eine starke, lang anhaltende antibakterielle Wirkung. Durch die langfristige Freisetzung von Wasserstoffperoxid in geringen Mengen eignet sich Revamil hydrophiles Wundgel besonders gut für chronische und infizierte Wunden. Eine Tube Revamil hydrophiles Wundgel enthält 18 Gramm gamma-sterilisierten Honig.

## Indikationen

Oberflächliche Wunden	•
Tiefe Wunden	•
Infizierte Wunden	•••
Chronische Wunden	•••
Akute Wunden	••
Mehrere Behandlungen mit einer Tube	•••

## Gebrauchsanweisung

- Die Wunde wie üblich reinigen
- Trockene Wunden leicht mit sauberem Wasser anfeuchten
- Das Wundgel dünn auftragen und wie üblich abdecken
- Die Wunde in der ersten Woche einmal täglich behandeln, danach alle zwei bis drei Tage.

## Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich  
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - [www.fribamed.de](http://www.fribamed.de)

## Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)  
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - [www.bfactory.nl](http://www.bfactory.nl)



Revamil® 