



Revamil® Balm | 15 Gramm Tube

Produktbeschreibung

Revamil® Balm ist eine Mischung aus einer indifferenten Hautschutzsalbe und reinem medizinischem Honig. Aufgrund des hohen Honiggehalts hat die Salbe sowohl gute Wundheilungseigenschaften als auch eine antibakterielle Wirkung. Revamil Balm ist hautfreundlich und eignet sich in erster Linie zur Behandlung oberflächlicher Wunden, wie beispielsweise Schürfwunden und Kratzverletzungen bei Ekzem. Revamil Balm kann in der professionellen Wundversorgung und auch zu Hause als Erste Hilfe Salbe eingesetzt werden.

Indikationen

Oberflächliche Wunden	••
Tiefe Wunden	•
Infizierte Wunden	•
Chronische Wunden	•
Akute Wunden	••
Hautfreundlich	•••

Gebrauchsanweisung

- Die Wunde je nach Bedarf wie üblich reinigen
- Die Salbe dünn auf die Wundoberfläche oder die beschädigte Haut auftragen
- Die Salbe einziehen lassen und eventuell mit einer Mullbinde abdecken
- Die Salbe kann mehrmals täglich bis zur vollständigen Heilung aufgetragen werden.

Vertrieb

fribamed GmbH - Goethestrasse 28 - 47877 Willich
Tel: +49 2154 482378 - Fax: +49 2154 482377 - www.fribamed.de

Hersteller

Bfactory Health Products B.V. - Remmerden 58 - 3911 TZ Rhenen (NL)
Tel: +31 (0)317 769 005 - Fax: +31 (0)85 877 8726 - www.bfactory.nl

